

## Ficha técnica

# ALGISITE Ag, apósito de alginato de calcio con plata



No contiene látex

## Características

- **Promueve un entorno húmedo** favorable para la curación de la lesión
- **Elevada capacidad de absorción**, incluso bajo compresión
- **La plata** impregnada en el apósito **elimina un amplio espectro de bacterias** presentes en la lesión
- **Reduce el dolor de forma significativa** en los cambios de apósito y minimiza la disrupción del tejido neoformado
- **Se adapta a los contornos de la herida**
- **Mínimos cambios de apósito**, puede permanecer colocado hasta 7 días, dependiendo de la naturaleza de la lesión y el nivel de exudado

## Descripción

ALGISITE Ag es un apósito de tejido no tejido de fibras de alginato de calcio impregnado con plata.

## Modo de acción

La impregnación de plata de ALGISITE Ag elimina un amplio espectro de bacterias que pueden estar presentes en la lesión.

El apósito forma una lámina gelificada al entrar en contacto con el exudado de la lesión, cuyo exceso es absorbido en este proceso. Cuando las fibras absorben el exudado de la lesión, los iones de sodio del exudado sustituyen a los iones de calcio del alginato, con lo que las fibras absorben el exudado formando un gel.

## Indicaciones

ALGISITE Ag está indicado para su uso en lesiones con un nivel de exudado de moderado a alto. Se utiliza en la curación de lesiones como:

- Lesiones de espesor total y parcial
- Úlceras de pierna arteriales, venosas y diabéticas
- Úlceras por presión
- Lesiones post-operatorias
- Úlceras fungosas

Algisite Ag puede utilizarse en combinación con terapia de compresión para la curación de úlceras venosas de pierna, siempre bajo supervisión médica.

Algisite Ag puede utilizarse en lesiones infectadas o propensas a infectarse.

## Instrucciones de uso

1. Limpiar / desbridar la lesión según el protocolo clínico local.
2. Comprobar que la piel circundante esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes.
3. Valorar la lesión para seleccionar el apósito de tamaño y forma adecuado. Asegurar que queda como mínimo un borde de 5mm de apósito alrededor del borde de la lesión. No es necesario cortar el apósito al tamaño y forma de la lesión.
4. Aplicar el apósito ALGISITE Ag centralmente sobre la lesión. Para lesiones cavitadas introducir las cintas directamente en la cavidad, dejando aproximadamente un trozo de 2mm fuera de la cavidad.
5. Aplicar un apósito secundario adecuado sobre ALGISITE Ag para evitar la deshidratación de la lesión.

Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación.

## Retirada del apósito

1. Retirar el apósito secundario.
2. Para retirar ALGISITE Ag, levantar los bordes del apósito y retirar primero la parte del apósito sin gel.
3. Para eliminar los restos de gel que hayan podido quedar en la lesión, irrigar con suero salino.

# ALGISITE Ag, apósito de alginato de calcio con plata

## Cambios de apósito

La frecuencia de cambio de ALGISITE Ag depende del tipo y condición de la lesión.

Generalmente, el apósito deberá cambiarse diariamente en heridas muy exudativas, reduciendo la frecuencia de cambio a medida que se reducen los niveles de exudado. El apósito puede permanecer colocado en la lesión hasta un máximo de 7 días,

## Composición

Tejido no tejido de fibras de alginato cálcico y plata.

## Características técnicas

Peso del apósito:  $\geq 100 \text{ g/m}^2$

Absorción:  $\geq 12 \text{ g/100cm}^2$  mín.

Dimensiones: Nominal  $\pm 0,5$

Características de dispersión: No se dispersa

Esterilización: Rayos gamma (según BS EN ISO 11137)

## Caducidad

3 años

## Almacenaje

Almacenar en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C. Mantener alejado de la luz solar.

## Clase CE

III, estéril

## Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited  
P.O.Box 81 Hessle Road  
Hull HU 2BN - United Kingdom

## Presentación

Referencia	Descripción	Unidades / envase	Envases / embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66800111	ALGISITE Ag apósito 5 x 5 cm	10	10	10 unidades	5000223461508
66800112	ALGISITE Ag apósito 10 x 10 cm	10	5	10 unidades	5000223461539
66800113	ALGISITE Ag apósito 10 x 20 cm	5	5	5 unidades	5000223461560
66800114	ALGISITE Ag cinta 2 x 30 cm	5	4	5 unidades	5000223461591

## Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60

Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

° Marca registrada de Smith & Nephew

FT 09.07/1