

Película permeable al oxígeno¹.

Espuma absorbente¹ con sulfadiazina de plata.

Adhesivo suave y gentil en gel².



 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
Ag Gentle

ALLEVYN® Ag Gentle Border es un apósito que permite gestionar el exudado a través de su tecnología única de triple acción que absorbe, retiene y transpira el balance óptimo de humedad,³ lo que favorece la generación de un ambiente húmedo que promueve la cicatrización de la herida³. La adición de sulfadiazina de plata en la almohadilla hidrocélular proporciona un nivel sostenido de acción antimicrobiana (*in-vitro*)⁵.

- Contiene una construcción trilaminar que consiste en un película superior altamente permeable al oxígeno, una almohadilla de espuma de poliuretano altamente absorbente y un adhesivo suave y gentil en gel
- El adhesivo en gel permite que el apósito sea seguro para su uso en piel frágil y sensible⁴
- Suave y cómodo para el paciente, el apósito se ajusta a las curvas y a las regiones corporales desafiantes³
- Fácil de aplicar y retirar², el adhesivo mantiene al apósito en su lugar aplicando un medio de retención secundario²
- Puede ser utilizado de manera conjunta a un vendaje compresivo²
- e ha probado su eficacia *in vitro* contra un amplio espectro de bacterias, incluyendo bacterias multiresistentes tales como *Pseudomonas*, *Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina* (SARM) y *Enterococcus Resistente a la Vancomicina* (ERV)⁵
- Ofrece una acción sostenida con propiedades antimicrobianas que se mantiene hasta por 7 días (*in vitro*)⁵

Indicaciones

Indicado para su uso en heridas superficiales, heridas granuladas, heridas agudas y crónicas exudativas y heridas de espesor total y parcial, tales como úlceras por presión, úlceras de pierna y úlceras de pie diabético, heridas infectadas, heridas neoplásicas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, úlceras fungiformes y heridas por epidermolísis bullosa.

Aplicación

Limpie la herida siguiendo los protocolos de su centro de salud. Elija el tamaño de apósito adecuado. ALLEVYN Ag Gentle puede recortarse para adaptarse a las regiones difíciles del cuerpo. Utilice siempre una técnica aséptica cuando recorte el apósito. Prepare y limpie la piel perilesional y elimine el exceso de humedad. Debe retirarse el exceso de vello para garantizar que el apósito quede en contacto con el lecho de la herida. Utilizando una técnica aséptica, retire el material protector de ALLEVYN Ag Gentle, aplicando la cara adherente sobre la herida, cerciorándose que el contacto con ésta sea total. Asegure el apósito con un sistema de retención secundario, por ejemplo, OPSITE® Flexifix, OPSITE® Flexifix Gentle, cinta adhesiva o vendaje ALLEVYN Ag Gentle puede levantarse y reposicionarse durante la aplicación sin perder sus propiedades adherentes. ALLEVYN Ag Gentle puede utilizarse en combinación con otras modalidades de tratamiento, por ejemplo, con terapia compresiva, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Cuando se utilice en combinación con una modalidad de terapia compresiva, el apósito debe recortarse al tamaño de la herida para asegurarse que el apósito quede adherido en la posición correcta, antes de aplicar la modalidad de compresión elegida. En caso de recortar el apósito, asegúrese de cubrir cualquier área de espuma expuesta con un apósito adecuado, cuidando de no cubrir la totalidad del apósito.


Frecuencia de los recambios

ALLEVYN Ag Gentle debe ser inspeccionado durante las primeras etapas del cuidado de heridas siguiendo los protocolos locales de su centro de salud.

Cuando se utilice en el tratamiento de heridas infectadas, debe valorarse la infección siguiendo los protocolos locales de su centro de salud. El apósito puede permanecer en su lugar hasta por 7 días, excepto en el área sacra donde los apósitos pueden permanecer hasta por 5 días, dependiendo de la condición de la herida y de la piel perilesional, o hasta que el exudado sea visible y se aproxime a 0.5cm del borde de la almohadilla, lo que ocurra primero. La decisión de en qué momento cambiar el apósito debe basarse en la valoración clínica, tomando en cuenta los protocolos locales de su centro de salud.

Remoción

Para retirar ALLEVYN Ag gentle, retire la retención secundaria, levante el apósito y aléjelo de la herida.

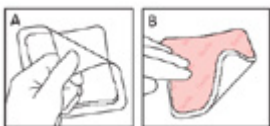

ALLEVYN - Orgullosos de poner a las personas primero

Para los pacientes. Para los presupuestos. Para hoy.®

Cuidado Avanzado de Heridas
Smith & Nephew
Medical Ltd
101 Hessele Road
Hull HU3 2BN
UK

www.smith-nephew.com/wound

*Marca registrada de Smith & Nephew
© Smith & Nephew Diciembre 2013
46492



T +44 (0) 1482 225181
F +44 (0) 1482 328326

Contraindicaciones

- No se utilice en pacientes con hipersensibilidad conocida a la sulfadiazina de plata o a las sulfonamidas
- Dado que las sulfonamidas favorecen el desarrollo de kernicterus, no debe utilizarse ALLEVYN Ag Adhesive en mujeres embarazadas, durante la lactancia, en bebés prematuros o durante los primeros meses de vida en bebés recién nacidos

Precauciones

- Para uso externo únicamente
- No utilice ALLEVYN Ag Gentle en combinación con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito (por ejemplo, EUSOL) o peróxido de hidrógeno, ya que pueden romper el compuesto de poliuretano absorbente del apósito
- ALLEVYN Ag Gentle pudiera no ser compatible con antimicrobianos tópicos
- En caso de infección, el uso de plata tópica no sustituye la necesidad de implementar una terapia sistémica u otro tratamiento adecuado para la infección
- Como ocurre con todos los productos adhesivos, puede presentarse irritación y/o maceración de la herida o la piel perilesional. En caso de presentarse enrojecimiento o sensibilidad, suspenda su uso y consulte con un profesional de la salud
- Cabe destacar que su uso inapropiado o un excesivo número de recambios puede derivar en una ruptura cutánea, particularmente en pacientes con piel frágil
- Evite el contacto con electrodos o geles conductores durante la toma de estudios electrónicos, tales como un EEG (Electroencefalograma) o un ECG (Electrocardiograma)
- Cuando se utilice ALLEVYN Ag Gentle durante un estudio de Resonancia Magnética, la temperatura del apósito pudiera aumentar
- ALLEVYN Ag Gentle no es compatible con productos oleosos como el petróleo.
- No se recomienda utilizar ALLEVYN Ag Gentle como apósito primario en heridas cavitadas, pero puede ser utilizado como apósito secundario
- Como ocurre con todos los productos que contienen sulfadiazina de plata, deben tomarse en cuenta las siguientes precauciones, especialmente si el apósito se utiliza para cubrir una superficie de grandes dimensiones:
 - Utilícese con precaución en pacientes con daño hepático o renal significativo,
 - Utilícese con precaución en individuos con una deficiencia de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa conocida,
 - Los efectos de fármacos administrados sistémicamente pueden verse alterados. Esto aplica específicamente a agentes hipoglucemiantes orales y a la fenitoina. En el caso de estos medicamentos, se recomienda monitorizar sus niveles séricos, ya que su efecto pudiera verse potencializado.
- ALLEVYN Ag Gentle es un producto de un solo uso

Códigos de producto de ALLEVYN Ag Gentle

Código	Tamaño	Piezas por empaque
66800464	5cm x 5cm	10
66800465	10cm x 10cm	10
66800466	10cm x 20cm	10
66800467	15cm x 15cm	10
66800468	20cm x 20cm	10

Referencias

1. Smith & Nephew Medical Ltd. Report Ref. DS/08/107/R1b ALLEVYN Ag Gentle Dressings Physical Properties. Carpenter S. Nov. 2008.
2. Data on File Report Ref. 0711086 Results from a 7 day volunteer trial evaluating ALLEVYN Gentle dressings in terms of pain on removal, dressing retention and other physical characteristics. A. Bond Dec 2007.
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Ag Gentle dressings and the moist wound environment. Myers D. April 2009.
4. Smith & Nephew technical. Justification AG001.
5. Smith & Nephew Research Centre Report Ref. RR-WMP07330-10-03. The equivalence of the antimicrobial efficacies of the ALLEVYN Ag foam variants against key wound pathogens. Driffeld K, Woodmansey E. 25/03/2009.