

 **smith&nephew**  
**CICA-CARE<sup>®</sup>**  
Lámina de gel adhesiva para  
el tratamiento de cicatrices

Ayuda a que desaparezcan las cicatrices



# CICA-CARE\*, lámina de gel adhesiva para el tratamiento de cicatrices

## Autoadhesivo

### Duradero

### Adaptable

### Reutilizable

CICA-CARE es una lámina de gel de silicona, suave, autoadhesiva y oclusiva, fabricada con silicona de grado médico y reforzada con una membrana externa de silicona. CICA-CARE ha sido diseñada para la prevención y el tratamiento de cicatrices hipertróficas y cerradas, tanto antiguas como nuevas, así como queloides. CICA-CARE utiliza los beneficios de las láminas de gel de silicona, aportando ventajas adicionales por ser autoadhesiva y de larga duración. Resulta económica y de mayor aceptación por el paciente en el tratamiento y prevención de cicatrices.

## Beneficios

### Autoadhesivo

La patente tecnológica de CICA-CARE permite que el lado adhesivo se coloque sobre la piel del paciente, mientras que la capa superior no es adherente. Debido a esto, no es necesaria una fijación secundaria, resultando un producto más fácil de utilizar y cómodo para el paciente.

### Duradero

La combinación de la membrana de silicona y el gel ofrecen un excelente soporte, por lo que CICA-CARE es más duradero.

### Adaptable

CICA-CARE es una lámina adaptable de gel de silicona. CICA-CARE es autoadhesiva y se adapta fácilmente a cualquier zona corporal, incluso en lóbulos de las orejas y áreas externas.

### Reutilizable

CICA-CARE puede lavarse siguiendo las instrucciones adjuntas y por tanto es reutilizable.

Generalmente, una lámina de CICA-CARE se puede utilizar hasta 28 días.

### Económico

La durabilidad y reutilización de CICA-CARE lo convierten en un producto económico.

### Más flexible

CICA-CARE ha sido rediseñado específicamente para ser más flexible.

## Aplicación

Una vez la lámina ha sido recortada para adaptarse al tamaño de la cicatriz, situar la parte adherente sobre la cicatriz o herida cerrada. Si bien CICA-CARE es autoadhesivo, puede también fijarse con un vendaje elástico fino o esparadrapo.

Para incrementar la tolerancia de CICA-CARE, comenzar aplicándolo sólo durante cuatro horas diarias durante los primeros dos días. Aumentar a ocho horas los siguientes dos días y continuar

## Económico

### Fácil de usar

### Más flexible

incrementando su uso en 2 horas diarias hasta llegar a las 24 horas, momento en que se alcanza el óptimo desarrollo del tratamiento.

## Precauciones

En algunos pacientes se ha observado sarpullido en la piel tratada. Esta reacción se atribuye o bien a una escasa higiene o a que está demasiado apretado. En presencia del sarpullido, reducir el tratamiento con CICA-CARE a doce horas con un intervalo de descanso de doce horas. Si el sarpullido persiste, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Sobre incisiones quirúrgicas, utilizar únicamente cuando los puntos han sido retirados.

## Indicaciones

Utilización temporal en cicatrices existentes y en nuevas cicatrices hipertróficas o queloides.

Utilización temporal como terapia profiláctica sobre heridas cerradas para prevenir la aparición de cicatrices hipertróficas o queloides.

## Contraindicaciones

CICA-CARE está contraindicado en pacientes con patologías complicadas, por lo que resulta inapropiada su utilización en nuestros casos, y en pacientes cuya condición dermatológica interrumpe la integridad de las áreas de piel a cubrir. No aplicar sobre piel con acné. No utilizar sobre heridas abiertas o infectadas.



### Presentaciones

Código	Medidas	Envase
66250704	12 x 6 cm	1 u.

### Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2-4  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 93 373 74 53

EducacionAWC@smith.nephew.com  
www.smith-nephew.com/es/

\*Marca registrada de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew