

RENASYS[®] -F con Soft Port, kits de espuma para la aplicación de terapia de presión negativa.



Descripción

■ Los kits de drenaje contienen:

- RENASYS[®] Soft Port con sistema de sellado.
- Espuma de poliuretano (Foam).
- Film transparente.

Estos kits han sido diseñados para utilizarse con las consolas RENASYS[®] EZ y RENASYS[®] EZ PLUS, RENASYS[®] GO y EZCARE[®] de Smith & Nephew.

Indicaciones

Los kits de apósitos para heridas RENASYS[®] -F están diseñados para utilizarlos conjuntamente con los sistemas de tratamiento de heridas con presión negativa (NPWT) de Smith & Nephew con el objetivo de aplicar presión negativa a la herida. Los sistemas de terapia con presión negativa de Smith & Nephew pueden favorecer la cicatrización de las heridas.

La NPWT es un sistema apropiado para los siguientes tipos de heridas:

- Úlceras de presión
- Úlceras diabéticas/neuropáticas
- Úlceras por insuficiencia venosa
- Heridas traumáticas
- Heridas quirúrgicas postoperatorias y por dehiscencia
- Fístulas exploradas
- Injertos y colgajos cutáneos

- Heridas resistentes a tratamiento convencional o que se prevé sean de larga duración.
- Heridas profundas y/o con gran cantidad de exudado. Como tratamiento coadyuvante a otras intervenciones o técnicas o en la preparación del lecho de la herida para otras intervenciones.

Precauciones

Deben tomarse precauciones en pacientes con:

- Tratamiento anticoagulante.
- Problemas de hemostasia.
- Mala disposición o agresividad del paciente
- Malnutrición no tratada.

Contraindicaciones

Contraindicado en pacientes con:

- Tejido necrótico (escaras).
- Osteomielitis no tratada.
- Heridas malignas (excepto para mejorar la calidad de vida).
- Órganos o vasos expuestos.
- Fístulas no exploradas.

Composición

| | |
|---|---|
| RENASYS [®] Soft Port con sistema de sellado | Silicona y polipropileno  |
| Film transparente | Poliuretano  |
| Espuma (foam) | |

RENASYS™-F con Soft Porçkits de espuma para la aplicación de terapia de presión negativa.

Contenido del Kit










| | Pequeño | Mediano | Grande | Extra Grande |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Drenaje y sistema de sellado | Sí | Sí | Sí | Si |
| Film transparente | 1 film de 20 cm x 30 cm | 2 films de 20 cm x 30 cm | 3 films de 20 cm x 30 cm | 2 films de 40 cm x 60 cm |
| Espuma (Foam) | 10 cm x 8 cm x 3 cm | 20 cm x 12,5 cm x 3 cm | 25 cm x 15 cm x 3 cm | 50 cm x 63 cm x 1,5 cm |

Presentación

| Código Producto | Descripción | Unidades / Envase | Unidad mínima de Venta | Código EAN | Código EAN caja 5 unidades |
|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| 66800 794 | RENASYS™-F Pequeño | 1 | 5 | 00040565125381 | 30040565125382 |
| 66800 795 | RENASYS™-F Mediano | 1 | 5 | 00040565125398 | 30040565125399 |
| 66800 796 | RENASYS™-F Grande | 1 | 5 | 00040565125404 | 30040565125405 |
| 66800 797 | RENASYS™-F Extra Grande | 1 | 5 | 00040565125411 | 30040565125412 |

| Certificación | Composición | Esterilidad | Conservación | Fabricante |
|---|---|---|---|---|
| ON nº 0297 CE nº 404394 MR2 Clase CE IIb Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008  |  |  |  12 meses     |  Smith & Nephew, Inc. 970 Lake Carillon Drive.Suite 110 ST. Petersburg, FL 33716.  Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN, EnglandUK. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U |

Leyenda símbolos

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | No contiene látex |  | Producto esterilizado con óxido de etileno |
|  | Caducidad |  | No reutilizar |
|  | Manténgase en lugar seco |  | Temperatura de almacenamiento |
|  | No utilizar si el envase está abierto o dañado |  | Representante autorizado |
|  | Fabricante | | |