

## Ficha técnica

# IODOSORB OINTMENT, pomada de cadexómero yodado



No contiene látex

### Descripción

IODOSORB Ointment es una pomada estéril marrón oscuro que está compuesta de cadexómero (microesferas de almidón modificado), polietilenglicol y yodo. Las esferas de cadexómero son biodegradables. IODOSORB Ointment absorbe el exceso de exudado y de esfacelos del lecho de la lesión y reduce los microorganismos sobre la superficie de la lesión, transformándose en un gel blando y húmedo.

### Indicaciones

IODOSORB Ointment está indicado para el tratamiento tópico de lesiones que exudan crónicamente. IODOSORB Ointment puede utilizarse debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Ointment puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas la infección debe ser inspeccionada y tratada según el protocolo clínico local.

### Instrucciones de uso

1. Lavarse las manos bien antes y después del uso. Utilizando guantes, limpiar la lesión y el área de alrededor con un chorro suave de agua o solución salina. NO SECAR la superficie de la lesión.
2. Aplicar una cantidad suficiente de IODOSORB Ointment sobre un apósito estéril hasta formar una capa de 3 mm de grosor, con la misma forma de la lesión. Colocar el apósito impregnado con IODOSORB Ointment sobre la lesión. De manera alternativa aplicar IODOSORB Ointment a la lesión y untarlo uniformemente sobre la misma utilizando guantes, hasta que la lesión esté totalmente cubierta con una capa de 3mm de grosor.
3. Tapar la lesión completamente con un apósito secundario apropiado.
4. Aplicar un vendaje de compresión si fuera apropiado.

### Características

- Limpia el lecho de la lesión
- Absorbe esfacelos, debris y exudado
- Efectivo ante un amplio espectro de microorganismos
- Liberación prolongada de yodo, de forma continua, manteniendo los niveles de yodo en la lesión
- Promueve la cicatrización de la lesión
- Fácil de aplicar
- Se retira fácilmente, sin dañar el epitelio neoformado
- Ayuda a eliminar el olor
- El cambio de color de la pomada indica el momento en que el producto puede retirarse

Después de la aplicación debe tirarse el contenido sobrante en el tubo.

Una sola aplicación de IODOSORB Ointment no debe superar los 50 g (equivale a 5 tubos de 10g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 15 tubos de 10 g).

### Cambios de Iodosorb Ointment

1. IODOSORB Ointment debe cambiarse cuando esté saturado con el exudado procedente de la lesión y haya liberado todo el yodo. Esto se indica mediante la pérdida de color, normalmente de dos a tres veces a la semana. Si la lesión exuda mucho pudiera ser necesario realizar cambios diarios. Si fuera necesario, humedecer el apósito durante unos minutos y luego retirarlo.
2. Con cuidado retirar IODOSORB Ointment utilizando un chorro suave de agua o solución salina.
3. Con cuidado absorber el exceso de líquido, de haberlo, dejando la superficie de la lesión ligeramente húmeda antes de volver a aplicar IODOSORB Ointment.

### Composición

Cada gramo de pomada contiene 491 mg de cadexómero y 9 mg de yodo, 500 mg de estándar polietilenglicol y polaxómero. La cantidad total de yodo en el producto terminado es 0,9%.

### Contraindicaciones

IODOSORB Ointment no debe usarse sobre tejido necrótico seco o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a cualquiera de los otros componentes.

No utilizar IODOSORB Ointment en niños, mujeres embarazadas o lactantes ni en pacientes con trastornos de la glándula tiroidea o disfunción renal. (ej. Tiroiditis de Hashimoto o nódulos no tóxicos de bocio).

# IODOSORB OINTMENT, pomada de cadexómero yodado

## Advertencias

Hay riesgo posible de interacción con el litio, lo que da como resultado una posibilidad mayor de que se produzca hipotiroidismo.

NO utilizar IODOSORB Ointment concomitantemente con antisépticos de mercurio o taurolidina.

Si el paciente debe realizarse pruebas tiroideas deberá informar al facultativo.

## Precauciones durante el uso

- El contenido del tubo sólo debe utilizarse en un paciente.
- No utilizar IODOSORB Ointment cerca de los ojos, oídos, nariz o boca.
- El producto es para uso externo solamente.
- IODOSORB Ointment puede ocasionar un ligero dolor (escozor, picor) pasajero la primera hora después del tratamiento. Esto significa que la pomada está comenzando a limpiar la lesión.
- Ocasionalmente, IODOSORB Ointment puede hacer que la piel perifulceral se inflame o enrojezca. Esta es una condición pasajera. Si los síntomas persisten o si el paciente experimenta otros síntomas, deberá contactar con el facultativo.
- El contacto con la piel perifulceral/piel intacta debe reducirse al mínimo.
- Es posible que se forme una corteza adherente si se deja que IODOSORB Ointment se seque.

- Una sola aplicación de IODOSORB Ointment no debe superar los 50 g (equivale a 5 tubos de 10 g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 15 tubos de 10 g).
- La duración del tratamiento no debe ser superior a los 3 meses.

## Caducidad

3 años

## Esterilización

Esterilizado mediante radiación gamma

## Almacenaje

Conservar en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C.

## Clase CE

III, estéril

## Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited  
P.O.Box 81 Hessle Road  
Hull HU 2BN - Inglaterra

## Presentación

Código de producto	Descripción	Unidades / envase	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66001298	Iodosorb Ointment (tubos 10g)	4 tubos/caja	1 caja	5000223457907

## Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 933 373 74 53;  
Tel. Atención Cliente: 93 373 73 14; 93 373 71 14; 93 373 74 14; 93 373 71 65  
Fax. Atención cliente: 93 373 72 65; 93 373 76 03

EducaciónAWM@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.com

° Marca registrada de Smith & Nephew

FT 09.07/1