


 **smith&nephew**
OPSITE[◇]
FLEXIGRID[◇]
Apósito transparente de
poliuretano

Película adhesiva transparente resistente al
agua y a las bacterias

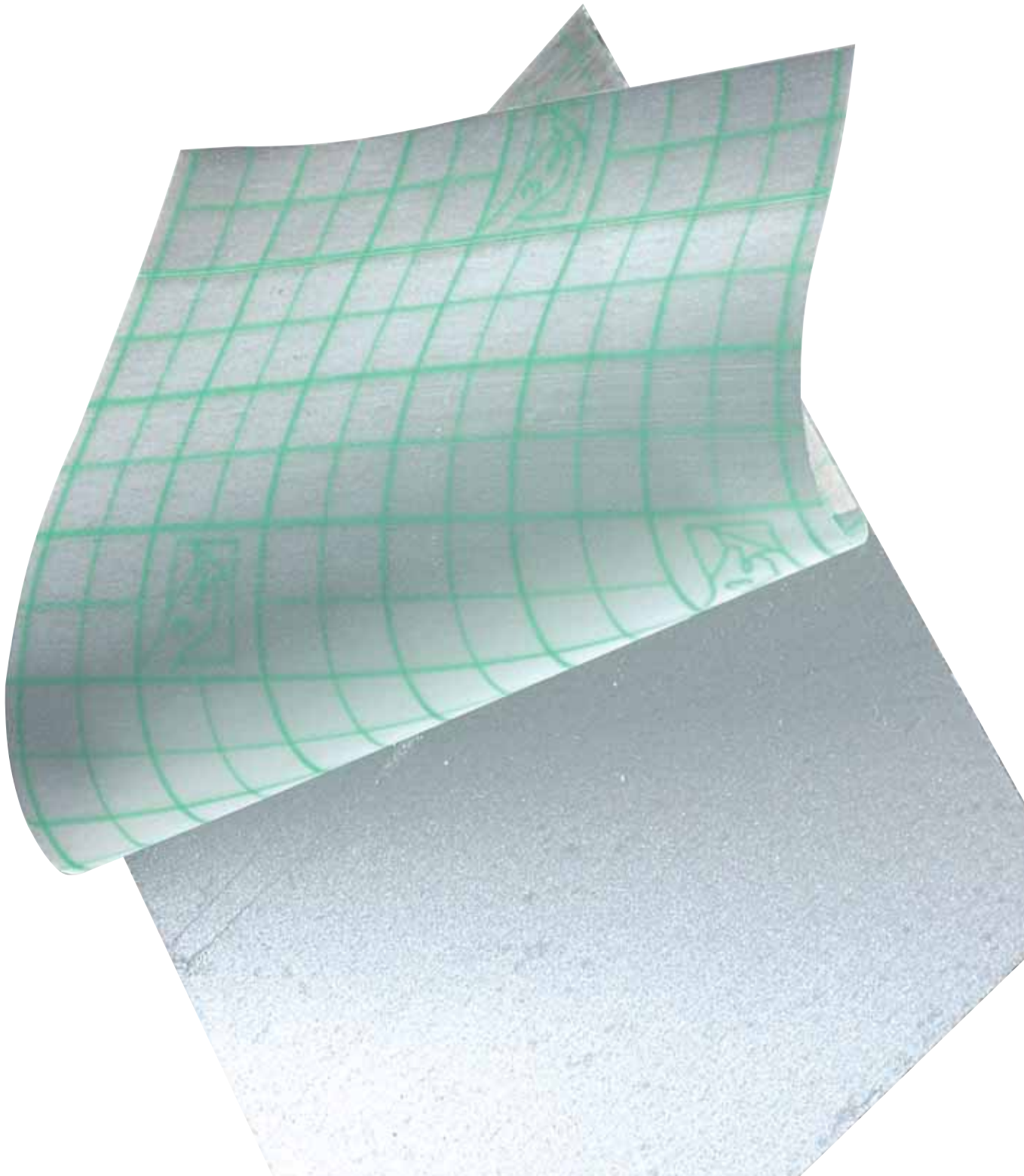

OPSITE® FLEXIGRID®, apósito transparente de poliuretano

Cicatrización más rápida y menos dolorosa

Película con adhesivo acrílico
Impermeable y barrera bacteriana

OPSITE es una película transparente y adhesiva, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible. Está clínicamente probado que promueve la cicatrización en ambiente húmedo, siendo ideal para ser utilizado como apósito secundario y como profilaxis de úlceras por presión.

Beneficios

Cicatrización más rápida y menos dolorosa

OPSITE retiene el exudado natural que contiene nutrientes vitales necesarios para el crecimiento de las células y glóbulos blancos para prevenir infecciones. La evaporación del exceso de humedad disminuye el riesgo de maceración de la piel.

Película con adhesivo acrílico

OPSITE es extensible y adaptable, lo que, combinado con su alta permeabilidad ante la evaporación de la humedad, hace que el apósito pueda permanecer sobre la herida hasta catorce días, por lo que se reduce el tiempo necesario para su cuidado.

Impermeable y barrera bacteriana

OPSITE FLEXIGRID es impermeable al agua y a fluidos corporales, protegiendo la piel bajo el apósito y permitiendo el aseo del paciente sin cambio de apósito. La película proporciona una barrera ante bacterias, reduciendo el riesgo de infecciones secundarias.

Técnica de aplicación sencilla y efectiva

OPSITE FLEXIGRID ofrece un sencillo y efectivo sistema de aplicación. Su aplicador permite que el apósito sea colocado con una sola mano y adaptarlo a la zona lesionada. Al ser transparente, se puede ver correctamente la colocación del apósito sobre la herida.

Adaptable a zonas difíciles

OPSITE FLEXIGRID está diseñado para adaptarse a cualquier zona del cuerpo. Se puede recortar con facilidad en tiras o cualquier forma específica, para su aplicación sobre áreas difíciles como tobillos, codos y rodillas.

Sistema único que permite la medición de la herida.

OPSITE FLEXIGRID incorpora un sistema único para la medición de la herida, sencillo y preciso, facilitando la observación del proceso de curación. Tras dibujar el contorno de la herida, la lámina se retira, pudiéndose archivar junto con el historial médico.

Técnica de aplicación sencilla y efectiva

Adaptable a zonas difíciles
Sistema único que permite la medición de la herida

Indicaciones

OPSITE FLEXIGRID está indicado para:

Heridas superficiales, como rozaduras, quemaduras menores, cortes y abrasiones.

Profilaxis y protección de UPP, alrededor de estomas y bolsas de ostomía.

Como apósito secundario de ALLEVYN CAVITY®.

Disminución del dolor en neuropatías diabéticas.

Aplicación y retirada

Antes de aplicar OPSITE FLEXIGRID, la piel debe estar perfectamente limpia y seca. Para retirar la película, levantar una esquina y tirar paralelamente a la piel con suavidad para despegar la parte adhesiva.

Precauciones

OPSITE FLEXIGRID puede utilizarse en heridas infectadas siguiendo las siguientes precauciones:

- El paciente deberá estar bajo supervisión médica/clínica.
- El apósito deberá cambiarse diariamente.
- El paciente debe encontrarse bajo tratamiento sistémico adecuado.

Los pacientes con problemática inmunológica o diabéticos necesitan una supervisión más específica.

Se deberá tener precaución para evitar dañar las pieles frágiles. Al igual que todos los productos adhesivos, se han detectado algunos casos de irritación y/o maceración de la piel alrededor de la herida. El uso inadecuado o frecuentes cambios de apósito, especialmente en pacientes con pieles frágiles, puede llevar a agrietamientos o roturas cutáneas.



Presentaciones

Código	Medidas	Envase
4628	6 x 7 cm	100 u.
4630	12 x 10 cm	50 u.
4631	15 x 20 cm	10 u.
4632	12 x 25 cm	20 u.
4629*	12 x 10 cm	10 u.

* Reembolsable por la Seguridad Social (C.N. 471060)

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 93 373 74 53

EducacionAWC@smith.nephew.com
www.smith-nephew.com/es/

*Marca registrada de Smith & Nephew
© Smith & Nephew