


Este documento pretende ser una guía rápida y visual que permita manejar el sistema Renasys GO y resuelva de forma eficaz las dudas que surjan en el momento de aplicarlo en un paciente. Por esta razón los temas se han desarrollado de forma esquemática, en caso de que las explicaciones no fueran suficientes le recomendamos consulte el prospecto de la consola Renasys GO.

## Mandos, controles y pantallas de la consola

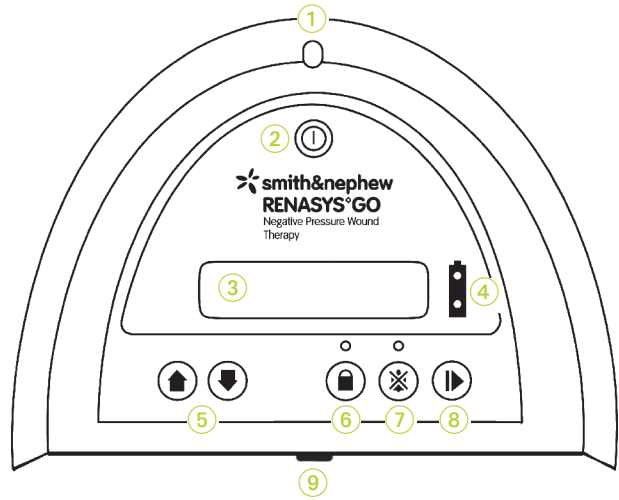

- 1 Indicador de encendido
- 2 Botón de encendido. Enciende y apaga el dispositivo
- 3 Pantalla digital
- 4 Indicador de batería. Muestra la duración de la batería
- 5 Botones de flechas arriba y abajo. Permiten aumentar/disminuir la presión y desplazarse por las opciones del menú
- 6 Bloqueo del teclado. Evita modificaciones accidentales del tratamiento
- 7 Pausa de audio. Silencia la alarma unos 2-3 minutos
- 8 Inicio del tratamiento / Seleccionar y confirmar
- 9 Puerto de entrada

### Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.U.  
Fructuós Gelabert, 2-4  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel.: 902 303 160  
Fax: 902 303 170

[www.smith-nephew.com/es/](http://www.smith-nephew.com/es/)

° Marca registrada de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew

Papel reciclado y ecológico



**smith&nephew**  
**RENASYS<sup>®</sup> GO**  
Terapia de presión negativa

## Guía rápida de uso



### Puesta en marcha del dispositivo

El dispositivo funciona tanto con batería como con alimentación por corriente alterna. Si la batería no estuviera cargada, debe conectarla a través del enchufe situado en un lateral del dispositivo a la red eléctrica. Sabrá que la batería está cargando por que la luz de color verde parpadeará.

A continuación pulse el botón de encendido durante 2 segundos y el dispositivo mostrará:

Bienvenido  
Iniciando 00.64

En Espera  
→ 80mmHg

Seleccione la presión prescrita, utilizando los botones de flecha arriba y flecha abajo .

Inicie el tratamiento pulsando el botón de selección .

El dispositivo mostrará la pantalla:

Continuo  
→ 80mmHg

El tratamiento se puede interrumpir y reiniciar pulsando el botón de selección una vez. El dispositivo muestra un mensaje de estado en espera en la pantalla. El nivel de presión se puede volver a cambiar utilizando los botones de flecha arriba y flecha abajo.

En Espera  
→ 80mmHg

### Bloquear o desbloquear el teclado

Pulse el botón de bloqueo del teclado durante 2 segundos y se encenderá una luz azul.

Teclado bloq.  
→ 80mmHg

Para desbloquear pulse de nuevo el botón de bloqueo del teclado durante 2 segundos.

Teclado Activo  
→ 80mmHg

Si después de 10 minutos no se ha utilizado el teclado, éste se bloqueará automáticamente. La luz azul situada sobre el botón de bloqueo del teclado se encenderá.

### Apagado del dispositivo

Pulse el botón de encendido durante 2 segundos y el dispositivo se apagará.

## Opciones para el profesional sanitario

Renasys GO permite variar ciertos parámetros del tratamiento (Terapia Continua o Intermitente) o averiguar durante cuánto tiempo se ha aplicado la terapia.

### Entrada en el menú de Opciones del Profesional

Con el dispositivo apagado, pulse simultáneamente los botones de flecha abajo + selección + encendido durante 2 segundos. Aparecerá la siguiente pantalla

→ Continuo Intermitente

#### 1-Modo Continuo o Intermitente.

Para cambiar el tratamiento entre modo continuo e intermitente pulse los botones de flecha arriba o flecha abajo . Pulse el botón de selección para confirmar. Una vez iniciado el tratamiento, la pantalla mostrará el modo que se ha seleccionado.

#### 2- Información para el profesional sanitario.

Si continúa moviendo el cursor utilizando la flecha abajo , el dispositivo le mostrará la información de cuánto tiempo de tratamiento (total de horas y minutos de tratamiento continuo o intermitente) se ha administrado al paciente.

→ Intermitente Mostrar Tiempo

#### PARA MOSTRAR TIEMPO DE ACTIVIDAD

1-Pulse el botón de flecha abajo hasta que llegue a "Mostrar tiempo" y seleccione

Mostrar Tiempo → Borrar Tiempo

2-Aparecerá durante unos 6 segundos las horas y minutos de actividad.

→ Tiempo Activo xx H xx m

#### PARA RESTABLECER EL TIEMPO:

1-Pulse el botón de flecha abajo hasta que llegue a "Borrar tiempo" y seleccione

Mostrar Tiempo → Borrar Tiempo

2-Una vez pulsado el botón de selección el dispositivo mostrará la siguiente pantalla:

Borrar Tiempo → Activo?

3- Una vez confirmado pulsando le pedirá una última confirmación.

→ No Si

4- La pantalla se mostrará durante 6 segundos y después volverá al menú anterior.

Tiempo Activo Borrado

#### PARA MOSTRAR TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD

Esta función está disponible en la versión del software 0.66 y posteriores. El dispositivo muestra el número total de horas acumuladas en el modo activo. Este tiempo no puede restablecerse.

1. Pulse el botón de para mostrar el tiempo total y pulse el botón de

Borrar Tiempo → Tiempo total

Una vez que se haya pulsado el botón de el dispositivo mostrará la pantalla siguiente:

Horas totales Xxxxx H

La pantalla se mostrará durante 5 segundos y regresará al menú principal.

#### CARGA DE LA BATERÍA

Esta función está disponible en la versión del software 0.66 y posteriores. El dispositivo muestra el porcentaje de carga de la batería que queda. Para acceder a esta pantalla, es necesario seguir los pasos siguientes:

1. Pulse el botón de para mostrar Nivel de batería y pulse el botón de

Tiempo total → Nivel de batería

Una vez que se haya pulsado el botón de el dispositivo mostrará la pantalla siguiente:

Nivel de batería Xxxxx H

Pulsando el botón de y regresará al menú principal.

### Batería

Renasys GO indica el nivel de batería con una combinación de señales luminosas (verdes y naranjas) continuas y parpadeantes y acústicas (pitidos con diferentes frecuencias), así como con mensajes en la pantalla cuando la batería está en un nivel muy bajo

Indicador	Nivel de batería	Indicador	Nivel de batería
	Hasta 20 h		Menos de 1 h Sonará 3 pitidos cada 10s.
	Hasta 10 h		2 minutos Pitido continuo. Tras dos minutos en un estado extremadamente bajo, el dispositivo se apagará.
	Hasta 6h		Una vez enchufada mostrará una luz verde intermitente. Aparecerá el mensaje: Cargando
	Hasta 3 h Sonarán 2 pitidos cada 30s.		

## Alarmas

Alarma	Mensaje en pantalla	Descripción	Causa
Vacío bajo		El sistema detecta que la presión negativa que llega a la herida es inferior en más 15mmHg a la prescrita, durante más de 30 segundos.	Existe una fuga (en el depósito, en el tubo de conexión o en el apósito). Hay un mal funcionamiento del dispositivo
Vacío alto		El sistema detecta que la presión negativa que llega a la herida es superior en más 15mmHg a la prescrita, durante más de 30 segundos.	Vacío alto debido posiblemente a un mal funcionamiento del dispositivo.
Vacío excesivo		El sistema ha detectado un vacío excesivamente alto (de >225mmHg).	Vacío alto debido posiblemente a un mal funcionamiento del dispositivo. El dispositivo se detendrá.
Bloqueo / Depósito lleno		El sistema detecta que el depósito está lleno o que hay un bloqueo en el tubo de conexión al depósito.	Bloqueo en los tubos, depósito lleno o filtro interno del depósito cubierto de exudado.
Fuga		El sistema ha detectado una fuga significativa durante más de 1 minuto.	Existe una fuga en/alrededor del apósito. Conexión del drenaje y el tubo del depósito
Fallo del dispositivo		El dispositivo tiene un error irreparable.	Error interno de software o hardware. Devolver a SMITH & NEPHEW

